


Istruzioni per il prelievo

1 Prelevare il sangue

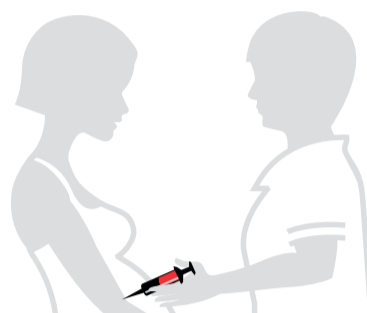


10 ml di sangue in almeno una provetta con anticoagulante EDTA (tappo viola)



2 Confezionamento del campione



Provetta EDTA

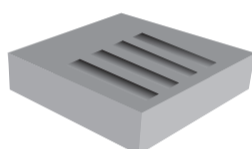

Spugna portaprovette



Busta rischio biologico

Compilare l'etichetta con i dati del paziente e apporla sulla provetta. Inserire la provetta nella spugna e richiuderla nella busta del rischio biologico

3 Confezionamento del box



Busta rischio biologico

+




Modulo di richiesta

+




Consenso Informato

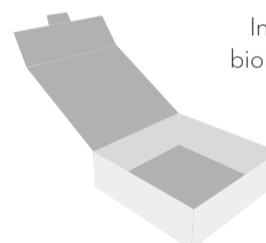

Box

Inserire la busta del rischio biologico il modulo di richiesta e il consenso informato nel box

4 Spedizione del campione

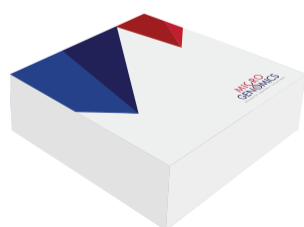

Box



Inserire il box dentro la busta del Corriere Espresso già provvista di bolla di spedizione.

Recarsi in un centro di ritiro del Corriere Espresso oppure contattarci al 0382 1753184 per programmare il ritiro.